

Ergänzende Informationen zur Gebrauchsanweisung beim privaten Erwerb eines Pflegebettes

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Firma Burmeier hat dieses Bett für Sie gebaut, um Sie bei allen Herausforderungen der häuslichen Pflege bestmöglich zu unterstützen. Wir verfolgen mit Leidenschaft das Ziel, hochwertige und langlebige Produkte zu entwickeln. Sie sollen Bewohnern den Aufenthalt im Bett sowie Pflegekräften und Angehörigen das Arbeiten am Bett so angenehm und sicher wie möglich gestalten. Daher prüfen wir vor der Auslieferung alle Funktionen und die elektrische Sicherheit. Jedes Bett verlässt unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Um diesen Zustand lange zu erhalten, ist eine fachgerechte Bedienung und Pflege des Bettes notwendig. Deshalb bitten wir Sie, die dem Bett beigegefügte Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen und zu beachten. Sie hilft Ihnen sowohl bei der ersten Inbetriebnahme des Bettes als auch im täglichen Einsatz. Als Anwender finden Sie hier alle Informationen über die komfortable Bedienung und sichere Handhabung des Bettes. Bitte nehmen Sie dieses Dokument als Ergänzung zu Ihrer Gebrauchsanweisung und bewahren Sie beide immer griffbereit auf.

Sie haben dieses Pflegebett als Privatkunde erworben und unterliegen somit nicht den zusätzlichen gesetzlichen Vorschriften, wie sie bei einer gewerblichen Nutzung zum Tragen kommen. Dennoch handelt es sich weiterhin bei dem Pflegebett um ein Medizinprodukt, dem aufgrund seiner Zweckbestimmung eine besondere Aufmerksamkeit bei der Montage und der Nutzung gewidmet werden muss.

Sollten bei der Montage oder Nutzung Probleme auftreten, nehmen Sie zur Sicherheit fachliche Hilfe in Anspruch.

Dieses Dokument ersetzt nicht die vorhandene Gebrauchsanweisung des Bettes, sondern ergänzt sie nur um die Besonderheiten bei der privaten, nicht gewerblichen Nutzung. Bei einer solchen privaten Nutzung entfallen somit auch viele der bei einer rein gewerblichen Nutzung vorgeschriebenen zusätzlichen Anforderungen (z. B. Desinfektion und jährliche Sicherheitsüberprüfungen). Weitere Details hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten beschrieben.

Allgemeine Hinweise

Diese Ergänzung zur Gebrauchsanleitung richtet sich an private Käuferinnen und Käufer, um einen sicheren Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten.

Zielgruppe des privaten Bereiches

Privatkäufer sind private Endanwender, die dieses Bett selbst zur privaten, nicht gewerblichen Nutzung erworben haben und eventuelle Montagearbeiten und den weiteren Betrieb eigenverantwortlich ausführen wollen.

Tipps zur sicheren Anwendung in häuslicher Umgebung

Bitte nutzen Sie die folgende Tabelle als Hilfestellung zur Erkennung und Vermeidung möglicher ungünstiger Anwendungsbedingungen:

Ungünstige Anwendungsbedingungen	Vermeidung durch
Elektrische Ausstattung:	
Beschädigung von Handschaltern/ Anschlussleitungen	Handschalter am Haken aufhängen, Leitungen nicht quer durch das Bett ziehen/nicht mit Rollen überfahren
Elektrische Verstellfunktionen nicht gesperrt, Einklemmung durch unbeabsichtigte Aktivierung ist möglich	Am Handschalter Funktionen sperren, wenn Bewohner/spielende Kinder hierdurch gefährdet werden können, Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Bett im Raum lassen
Möglichkeit von Hitzestau durch Fusseln und Staub auf elektrischen Antriebskomponenten	Antriebskomponenten unter der Liegefläche bei Bedarf mit trockenem Tuch abstauben
Haustiere können elektrische Leitungen anfressen: Möglichkeit von Funktionsstörungen/elektrischem Schlag	Keine Nagetiere frei im selben Raum mit dem Bett laufen lassen
Störende Geräte/Gegenstände in Bettnähe:	
Brandgefahr durch Hitze von Leseleuchten, Heizstrahlern usw.	Nur LED-Leseleuchten verwenden, die sich nicht stark erhitzen, nur technisch einwandfreie Geräte nach deren Gebrauchsanweisung verwenden, Sicherheitsabstände zum Bett beachten
Kollisionsgefahr/Sachschäden bei Verstellung des Bettes	Sicherheitsabstand zu anderen Gegenständen/Dachschrägen/Fensterbänken beachten
Eingeklemmte Anschlussleitungen/ Schläuche von Luft-Lagerungssystemen, Inhalatoren usw.	Leitungen/Schläuche so verlegen und fixieren, dass diese bei den Verstellungen des Bettes nicht eingeklemmt werden können



Gefahr durch Einklemmen/Strangulationen

Fragen Sie einen Angehörigen der Heilberufe um Rat, falls Sie bei der Nutzung der Seitensicherungen unsicher sind oder nicht wissen, ob bestimmte elektrische Verstelloptionen gesperrt werden sollten.

Reinigung und Desinfektion

Im privaten Gebrauch beschränkt sich die Nutzung des Pflegebettes gewöhnlich auf einen festen Personenkreis. Daher ist eine Reinigung als ausreichend zu betrachten. Die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen weitergehenden Angaben zur Desinfektion müssen im Regelfall nicht berücksichtigt werden.

Im privaten Bereich

Beachten Sie vor Beginn der Reinigung:

- Ziehen Sie das Schaltnetzteil aus der Steckdose und bewahren Sie es so auf, dass es nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel in Berührung kommt.
- Keines der elektrischen Bauteile darf eine äußere Beschädigung aufweisen. Nichtbeachtung kann zu Eindringen von Wasser oder Reinigungsmittel in die Elektronik führen und Funktionsstörungen oder Beschädigungen verursachen.
- Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme des Schaltnetzsteiles sicher, dass die elektrischen Kontakte frei von Restfeuchtigkeit sind.
- Die elektrischen Komponenten dürfen einem Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger oder Ähnlichem nicht ausgesetzt werden! Reinigung nur mit feuchtem Tuch!
- Besteht der Verdacht, dass Wasser oder sonstige Feuchtigkeit in elektrische Komponenten eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Schaltnetzteil aus der Steckdose bzw. stecken Sie es nicht erneut in die Steckdose. Kennzeichnen Sie das Bett deutlich als „defekt“, und nehmen Sie das Bett außer Betrieb. Veranlassen Sie eine Überprüfung durch eine Elektrofachkraft.



Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, sind erhebliche Schäden am Gerät und Folgefehler nicht auszuschließen!

Allgemeine Hinweise zur Reinigung

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, damit die Gebrauchsfähigkeit dieses Bettes möglichst lange erhalten bleibt:

- Wir empfehlen eine (feuchte) Wischreinigung. Bei der Auswahl des Reinigungsmittels muss darauf geachtet werden, dass es mild (haut- und oberflächenschonend) und umweltverträglich ist. Im Allgemeinen kann ein haushaltsübliches Reinigungsmittel verwendet werden.
- Zur Reinigung und Pflege der lackierten Metallteile ist ein feuchtes Tuch unter Verwendung handelsüblicher milder Haushaltsreiniger geeignet.
- Trotz der sehr guten mechanischen Beständigkeit sollten Kratzer und Stöße, die durch die komplette Lackschicht hindurchgehen, wieder mit geeigneten Reparaturmitteln gegen ein Eindringen von Feuchtigkeit verschlossen werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Edelpflegemittel und schleifmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Putzkissen. Hierdurch kann die Oberfläche beschädigt werden.

Instandhaltung

Im privaten Bereich

Servicepunkte:

Um potenzielle Geräuschbildung in den Liegeflächen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen vorsorglich folgende Stellen regelmäßig zu warten:

Drehpunkte: Sämtliche Drehgelenke von Rücken-, Oberschenkel- und Unterschenkellehnen sowie alle Drehgelenke des Untergestells

Schmiermittel: Zu empfehlen sind synthetische Schmierstoffe wie Teflonspray, Kriech- oder Haftöl.



Hinweis

Nehmen Sie die Matratze während der Schmierarbeiten aus dem Bett. Halten Sie ein Tuch unter die zu schmierenden Stellen, um einer Verschmutzung des Bodens vorzubeugen. Vermeiden Sie das Nachtropfen.

Inspektionsarbeiten

Bei privatem Einsatz gelten die gesetzlichen Grundlagen zur Instandhaltung nicht. Somit ist auch keine regelmäßige Inspektion durch sachkundige Personen vorgeschrieben. Wir empfehlen Ihnen dennoch für einen langjährigen störungsfreien Betrieb alle elektrischen und mechanischen Komponenten einmal jährlich zu überprüfen. Hierzu dient die in der Gebrauchsanweisung enthaltene einfache Checkliste für Anwender.



Hinweis

Besteht der Verdacht, dass eine Beschädigung oder Funktionsstörung vorliegt, ist das Bett sofort außer Betrieb zu nehmen und vom Stromnetz zu trennen, bis ein Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile erfolgt ist! Wenden Sie sich für den Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile an Ihren zuständigen Fachhändler.

Entsorgung von Elektroteilen

- Ausgetauschte elektrische Komponenten (Antriebe, Steuergeräte, Handschalter usw.) dieses Bettes sind Elektroschrott und enthalten wiederverwertbare Rohstoffe. Sie dürfen deshalb nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sind gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (In Deutschland umgesetzt im Elektro-Gesetz) getrennt zu sammeln und dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen.
- Private Eigentümer dieses Bettes sind daher verpflichtet, diese Komponenten zur Entsorgung in kommunale Sammelstellen zu geben.

Burmeier GmbH & Co. KG

Industriestraße 53

32120 Hiddenhausen

Phone +49 (0) 5223 9769 - 0

Fax +49 (0) 5223 9769 - 090

info@burmeier.com

burmeier.com