


## Bočne stranice


### Pričvršćivanje

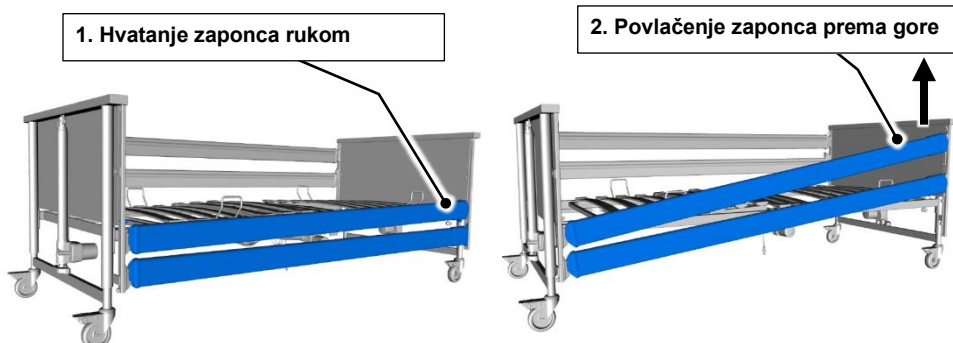

3. Provjerite dosjed odozgo pritiskom na zaponce bočnih stranica.

4. Ponovite postupak na drugim stranicama.


### Spuštanje

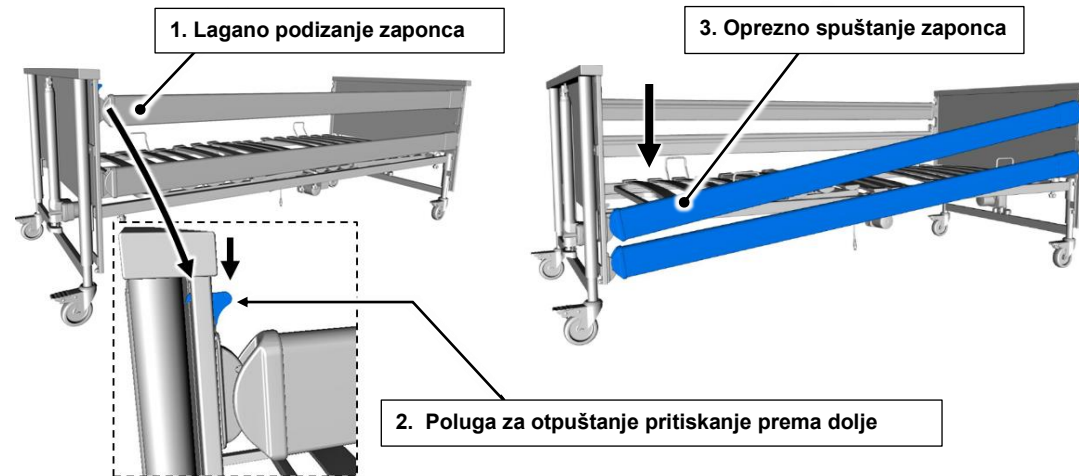


4. Ponovite postupak na drugim stranicama.

## Trapezni rukohvat

### Vodoravno namještanje

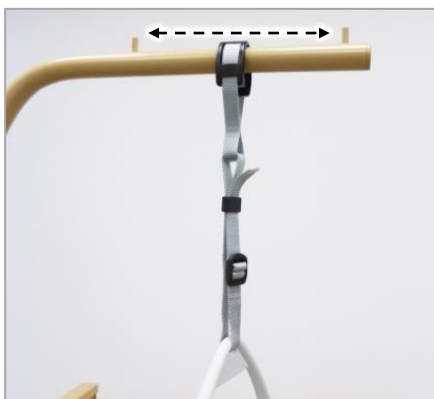

### Okomito namještanje

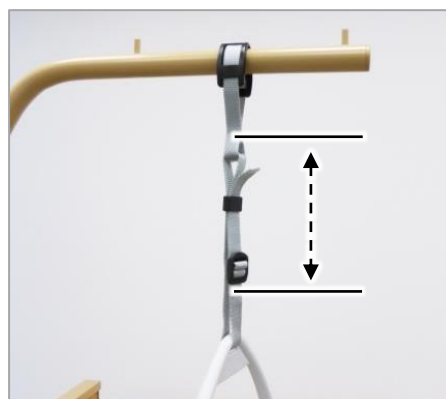

### Rukovanje (skraćivanje/produljivanje)


Remen ① izvucite kroz kopču ② :

**Skraćivanje:** Kraj remena ③ povucite prema gore

**Produljivanje:** Trapezni rukohvat ④ povucite prema dolje

**i** Maksimalna nosivost 75 kg


**i** Prilikom produljivanja pripazite na to da kraj remena strši minimalno 3 cm iznad brave remena.

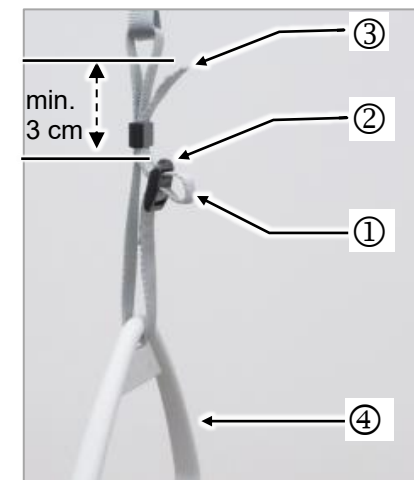

## Zamjena Bluetooth ručnog prekidača (bez kabela)

(Kod modela Dali standard, Dali low-entry i Dali wash)

- 1 Naslon za leđa
- 2 Visina ležne plohe
- 3 Naslon za natkoljenicu
- 4 Položaj spuštenih nogu
- 5 Magnetni senzor (prepoznatljiv po simbolu križića)
- 6 Pozicija za spavanje
- 7 Simbol baterije
- 8 LED
- 9 Simbol zaključavanja

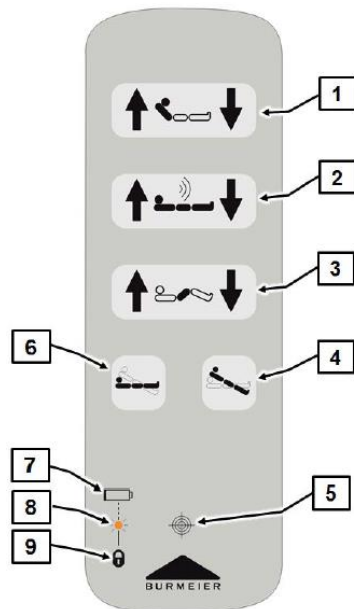

### Načelno vrijedi:

- = podizanje
- = spuštanje

### Pokažite bolesnicima funkcije ručnog prekidača!

- Pogonski motori rade onoliko koliko je pritisnuta odgovarajuća tipka.
- Krevet se može namjestiti u oba smjera, osim u slučaju položaja spuštenih nogu i pozicije za spavanje.
- Ručni prekidač je vodootporan i može se brisati.
- Ručni prekidač može se objesiti elastičnom kukom na krevet.

## Funkcija zaključavanja – Bluetooth ručni prekidač


### Molimo pripazite:

U ručnom prekidaču dolje nalazi se magnetni senzor.

Za zaključavanje, odnosno otključavanje funkcija potreban je labavi magnet **a** (dio isporuke).

Da biste zaključali/otkjučali ručni prekidač, postupajte kako slijedi:

1. Držite isporučeni magnet **a** na ručnom prekidaču integriranom u magnetni senzor.
2. Potom zaključajte / otključajte željenu funkciju.
  - Za zaključavanje pritisnite desnu tipku na ručnom prekidaču. Za otključavanje pritisnite lijevu tipku na ručnom prekidaču (pogledajte sljedeću tablicu).

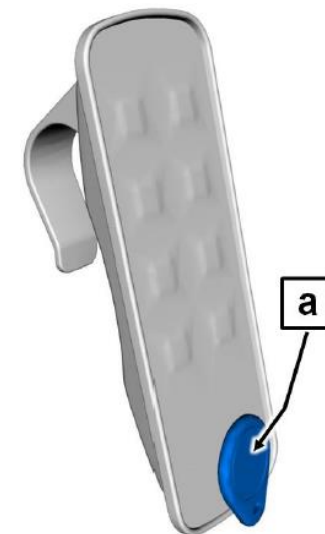

Otključavanje	Funkcija	Zaključavanje
	Naslon za leđa	
	Visina ležne plohe	
	Naslon za natkoljenicu	
	Pozicija za spavanje / položaj spuštenih nogu	

## Povezivanje ručnog prekidača s upravljanjem (samo modeli Dali standard, wash i low-entry)

**i** Molimo pripazite: Prije namještanja funkcija kreveta, ručni prekidač mora biti uparen (spojen) s upravljačem.

Povezivanje je važno samo prilikom stavljanja kreveta u pogon, zamjene Bluetooth ručnog prekidača i zamjene upravljanja.

Postupajte kako slijedi:

**i** Najprije odstranite magnet s ručnog prekidača kako biste spriječili neispravan rad.

1. Utaknite uklopni mrežni ispravljač u utičnicu.

- Ako je uklopni mrežni ispravljač već bio u utičnici, izvucite uklopni mrežni ispravljač iz utičnice, pričekajte oko 10 s i ponovno ga uključite.

2. Unutar 20 s, istodobno pritisnite obje tipke visine ležne plohe gore/dolje (unutar 0,5 s) najmanje u trajanju od 5 s.

- LED na upravljaču svijetli narančasto 4 s, ako je uparivanje bilo uspješno.
- LED na upravljaču treperi narančasto 4x, ako uparivanje nije bilo uspješno. U ovom slučaju ponoviti korake 1 i 2.

## Baterija Bluetooth ručnog prekidača

**i** Bluetooth ručni prekidač se pokreće pomoću CR-2032-litijske baterije.

Ako baterija slabi, LED-zaslon na ručnom prekidaču 4x treperi žuto pri svakom pritisku na tipku. Bateriju u tom slučaju treba promijeniti unutar nekoliko dana.

Postupajte kako slijedi:

1. Otvorite poklopac kućišta za baterije **a** na poleđini ručnog prekidača.

- Umetnite na primjer kovanicu u utor poklopca i okrenite je suprotno od kazaljke na satu.

2. Izvadite stare baterije.

3. Umetnite nove (pri tome paziti na polaritet).

4. Kućište baterije zatvorite poklopcem (okrećite u smjeru kazaljke na satu).



## Kabelski ručni prekidač

(Kod modela Dali standard, Dali low-entry i Dali econ)

### Uporaba


Kod tipki vrijedi načelno:

Podizanje: Spuštanje:

Zbog sigurnosnih je razloga u ručnom prekidaču ugrađena funkcija zaključavanja.

Zapornu bravu okrenite zapornim ključem u smjeru kazaljke na satu u položaj zaključavanja.

Boja svakog prikaza mijenja se sa zelene na žutu.

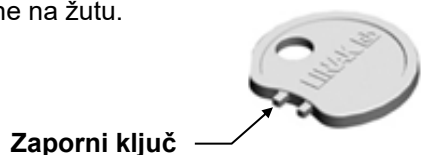

Ne okrećite zaporni ključ „nasilu“. Zaporna brava ili ručni prekidač mogu se oštetiti.

**Omogućen pogon:**  
zaporna brava stoji okomito  
Boja prikaza: zelena  
Tipke se mogu aktivirati („zvuk klika“)


**Zaključan pogon:**  
Zaporna brava stoji u smjeru kazaljke na satu na cca. 15°  
Boja prikaza: žuta  
Tipke su zaključane

## Rukovanje okretnim kotačima

**Opres!** Okretnim kotačima rukujte samo stopalima. Pri rukovanju krevetom nosite zatvorene cipele kako biste izbjegli ozljede na stopalima.

**Vožnja:** Udarnu polugu podižite prema gore samo hrptom stopala.

**Kočenje:** Stopalom pritisnite nožnu polugu prema dolje.

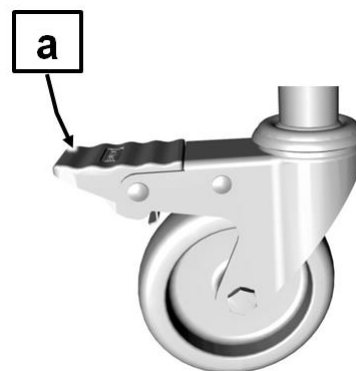

### OPREZ

Kratke upute za uporabu ne zamjenjuju glavne upute za uporabu kreveta za njegu Dali.

Pažljivo pročitajte glavne upute za uporabu i obratite pozornost na sigurnosne napomene!