


Bloqueio lateral


Colocação

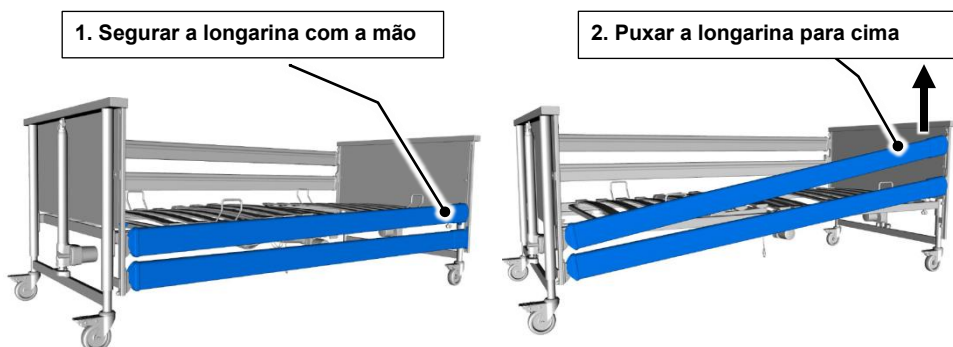

3. Verifique o encaixe através de pressão a partir de cima nas longarinas de bloqueio laterais.

4. Repeti o procedimento nos outros lados.


Baixar

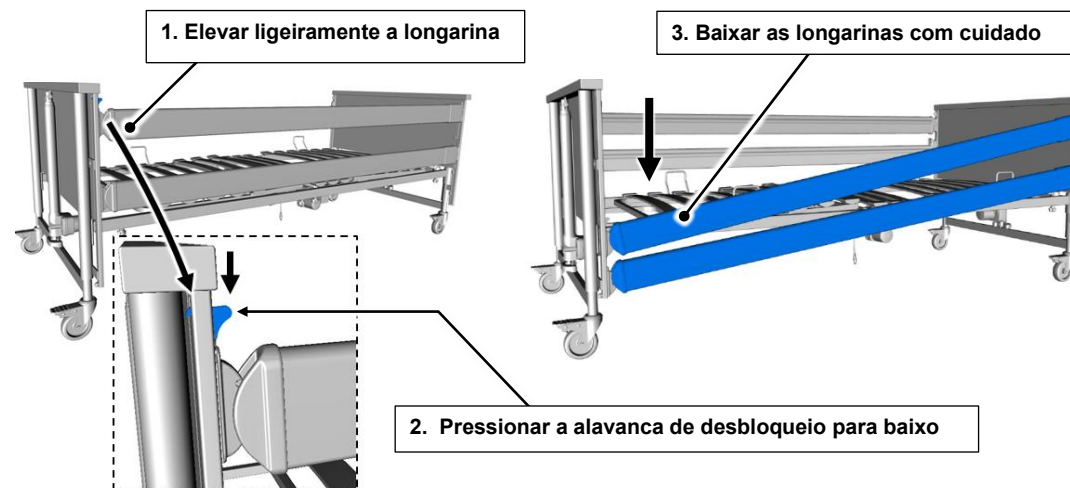


4. Repeti o procedimento nos outros lados.

Punho em triângulo

Ajuste horizontal

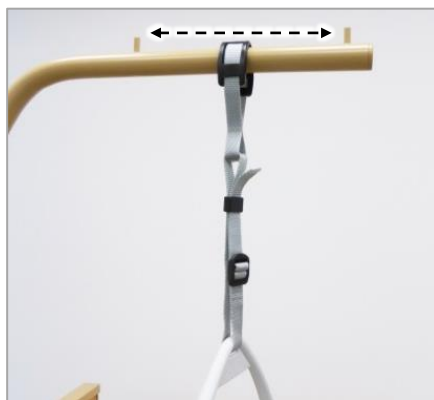

Ajuste vertical

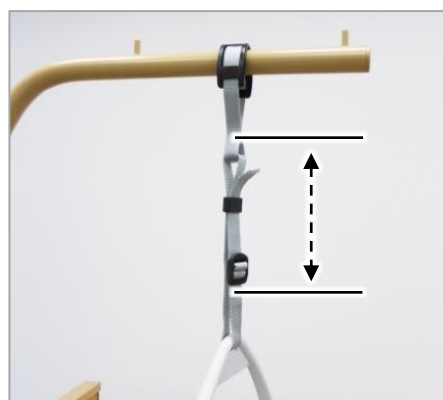

Operação (reduzir/aumentar)


Puxar o cinto ① pelo fecho do cinto ②:

Reduzir: Puxar a extremidade do cinto ③ para cima

Aumentar: Puxar o punho em triângulo ④ para baixo

i Capacidade de carga máxima 75 kg.


i Ao aumentar tenha atenção para que a extremidade do cinto sobressaia, no mínimo, 3 cm do fecho do cinto.

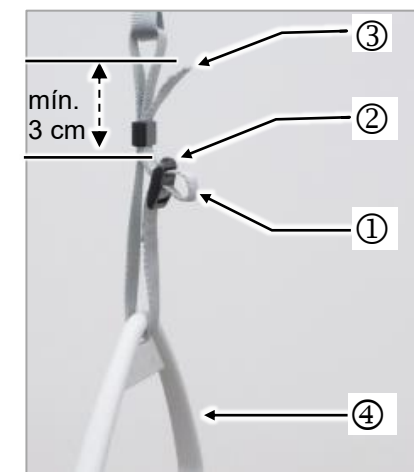

Interruptor manual Bluetooth (sem cabos)

(Na Dali Standard, Dali low-entry e Dali wash)

- 1 Apoio de costas
- 2 Altura da área de repouso
- 3 Apoio de coxa
- 4 Posição de maior profundidade de pés
- 5 Sensor magnético (identificável pelo símbolo de retículo)
- 6 Posição de dormir
- 7 Símbolo de bateria
- 8 LED
- 9 Símbolo de bloqueio

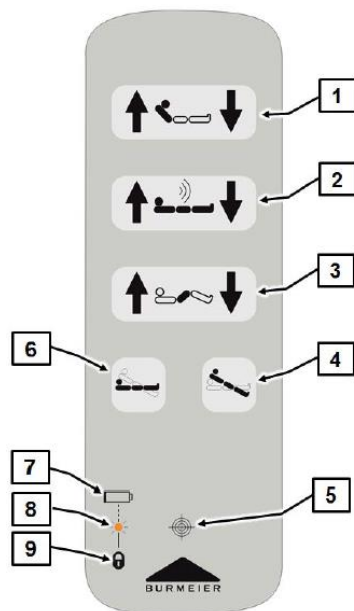

Basicamente vigora:

- = Elevar
- = Baixar

Instrua o residente sobre as funções do interruptor manual!

- Os motores de acionamento funcionam enquanto o respetivo botão for premido.
- As possibilidades de ajuste são possíveis em ambos os sentidos até à posição de maior profundidade dos pés e posição de dormir.
- O interruptor manual é à prova de água e lavável.
- O interruptor manual pode ser suspenso na cama com o seu gancho elástico.

Funções de bloqueio – Interruptor manual Bluetooth


Tenha em atenção:

Em baixo no interruptor manual encontra-se um sensor magnético.

Para o bloqueio ou desbloqueio de funções é necessário um íman solto **[a]** (parte do volume de fornecimento).

Proceda da seguinte forma para bloquear / desbloquear ajustes no interruptor manual:

1. Manter o íman fornecido em anexo **[a]** junto do sensor magnético integrado no interruptor manual
2. De seguida, bloquear / desbloquear a função pretendida.
 - Para bloquear pressionar o botão direita no interruptor manual. Para desbloquear pressionar o botão esquerdo (ver a seguinte tabela).

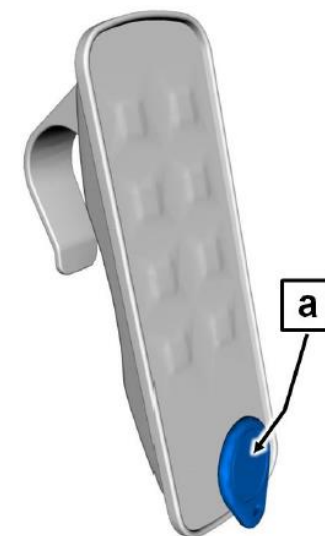

Desbloquear	Função	Bloquear
	Apoio de costas	
	Altura da área de repouso	
	Apoio de coxa	
	Posição de dormir / Posição de maior profundidade de pés	

Acoplar o interruptor manual ao comando (apenas na Dali standard, wash e low-entry)



Tenha em atenção: Antes das funções de cama poderem ser ajustadas, o interruptor manual tem de ser acoplado ao comando (ligado).

O acoplamento apenas é relevante em caso de colocação em funcionamento da cama, substituição do interruptor manual Bluetooth e do comando.

Proceda da seguinte forma:



Em primeiro lugar, retire os ímanes do interruptor manual para evitar anomalias.

1. Inserir a fonte de alimentação na tomada.
 - Caso a fonte de alimentação já esteja na tomada, retirar a mesma da tomada, aguardar aprox. 10 s e voltar a inserir.
2. Num período de 20 s premir ambos os botões Subir/descer a altura da área de repouso em simultâneo (num período de 0,5 s) durante, no mínimo, durante 5 s.
 - O LED no comando acende durante 4 s a laranja, se o acoplamento tiver sido bem-sucedido.
 - O LED no comando pisca 4x a laranja, se o acoplamento não tiver sido bem-sucedido. Nesse caso, repetir o passo 1 e 2.

Bateria - Interruptor manual Bluetooth




O interruptor manual Bluetooth é operado com uma bateria de lítio CR-2032.

Em caso de capacidade da bateria decrescente, a indicação LED no interruptor manual pisca 4x a amarelo a cada pressão do botão. A bateria tem de ser trocado dentro de poucos dias.

Proceda da seguinte forma:

1. Abra a cobertura do compartimento da bateria a na parte traseira do interruptor manual.
 - Insira, por ex. uma moeda na ranhura da cobertura e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Remova a bateria antiga.
3. Insira a nova bateria (ter em atenção a polaridade).
4. Fechar o compartimento da bateria com a cobertura (rodar no sentido dos ponteiros do relógio).

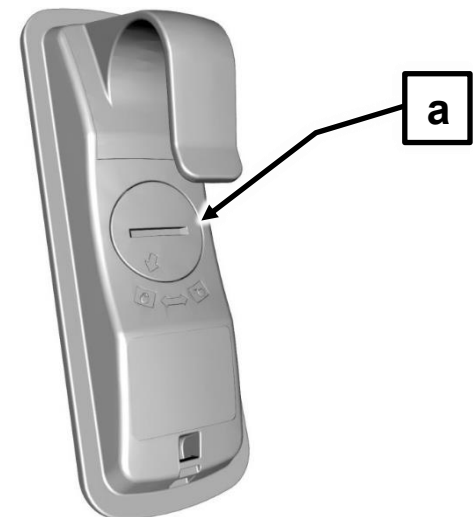

Interruptor manual com cabo

(Na Dali Standard, Dali low-entry e Dali econ)

Operação

Basicamente para os botões vigora:

Elevar: Baixar:

Por motivos de segurança, encontra-se uma função de bloqueio no interruptor manual.

Rodar a fechadura de bloqueio por meio de chave de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para a posição bloqueada.

A cor da respetiva indicação altera-se de verde para amarelo.



Chave de bloqueio



Não rodar a chave de bloqueio com "Força"! A fechadura de bloqueio ou o interruptor manual podem ser danificados.

Autorizar o acionamento:
A fechadura de bloqueio encontra-se na vertical
Cor da indicação: verde
É possível acionar os botões ("Ruído de clique")


Acionamento bloqueado:
de Fechadura bloqueio encontra-se rodada no sentido dos ponteiros do relógio em aprox. 15°
Cor da indicação: amarelo
Os botões estão bloqueados

Operação dos roletes

Cuidado! Apenas operar os roletes com o pé.
Durante a operação da cama use calçado fechado para evitar ferimentos nos pés.

Deslocação: Elevar a alavanca de pé com a parte de trás do pé.

Travões: Pisar a alavanca de pé com o pé para baixo.

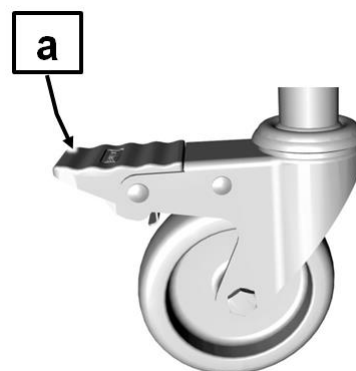

CUIDADO

O manual breve não substitui as instruções de utilização principais da cama hospitalar Dali.
Ler atentamente as instruções de utilização principais da cama hospitalar Dali!