
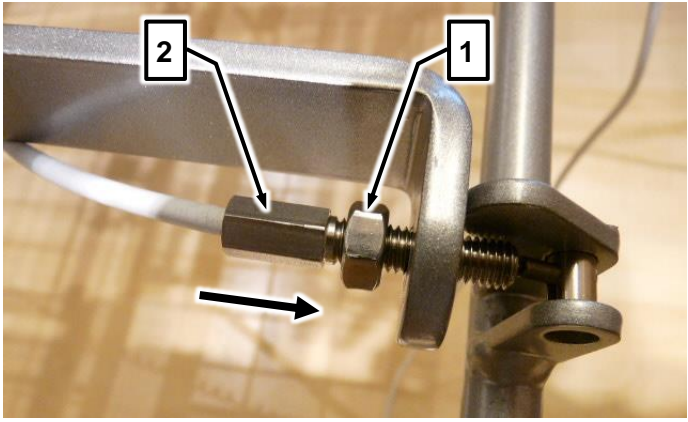
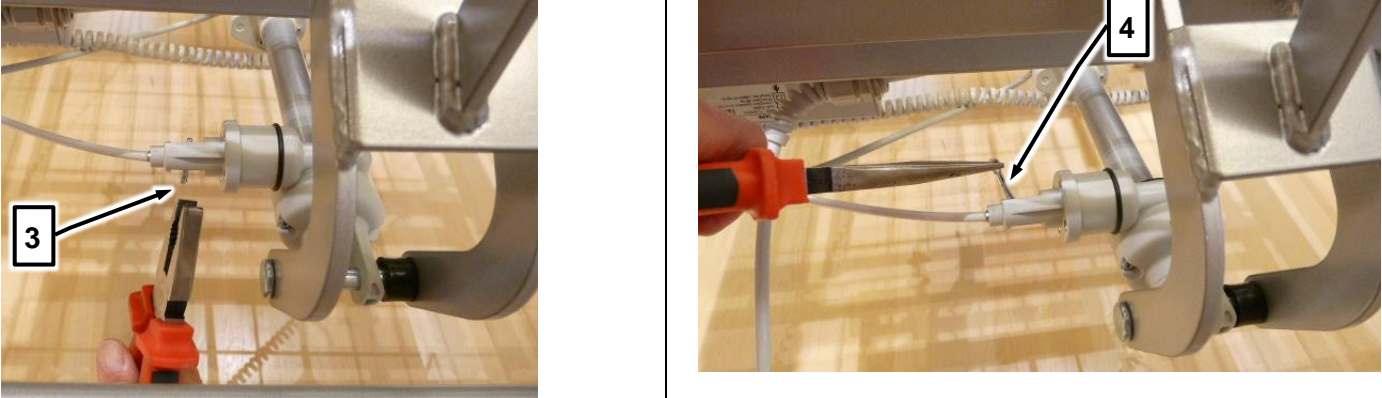
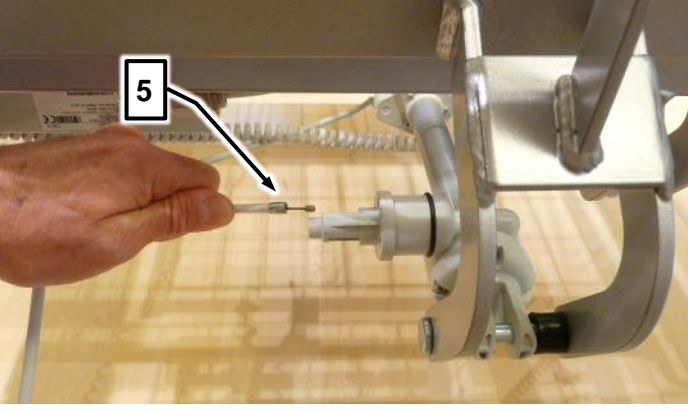
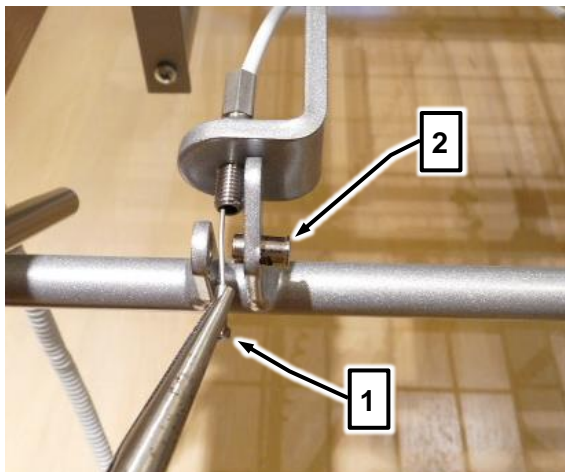
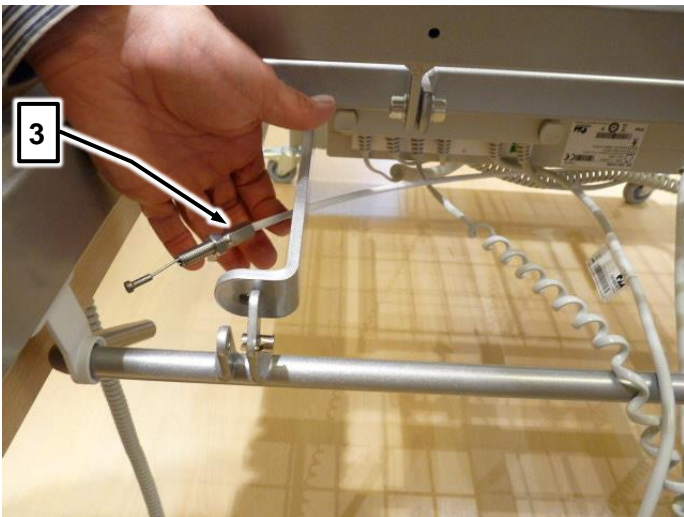


# Pflegebett Gigant II

## Demontageanleitung des Bowdenzuges



Gehen Sie wie folgt vor:

1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bremsen Sie das Bett</li><li>• Fahren Sie die Liegefläche in die höchste Position</li><li>• Stellen Sie die Rückenlehne komplett an</li></ul>	
2.	Bowdenzug (Hebelseite) entspannen <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontermutter <b>1</b> lösen</li><li>• Längenausgleich <b>2</b> in Pfeilrichtung drehen.</li></ul>	
3.	Splintenden <b>3</b> des Bowdenzuges (Motorseite) zusammendrücken und Splint herausnehmen <b>4</b> .	
4.	Bowdenzug (Motorseite) <b>5</b> aus der Bohrung / Glocke herausnehmen.	







<p>5.</p>	<p>Bowdenzug (Hebelseite) herausnehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plombe <b>1</b> mit der Zange herausziehen</li> <li>• Schloss <b>2</b> nach außen herausziehen</li> </ul>	
<p>6.</p>	<p>Längenausgleich <b>3</b> aus dem Gewinde herausschrauben und Bowdenzug (Hebelseite) entnehmen.</p> <p><b>Ende der Demontearbeiten</b></p>	

## Montageanleitung des Bowdenzuges

Gehen Sie wie folgt vor:
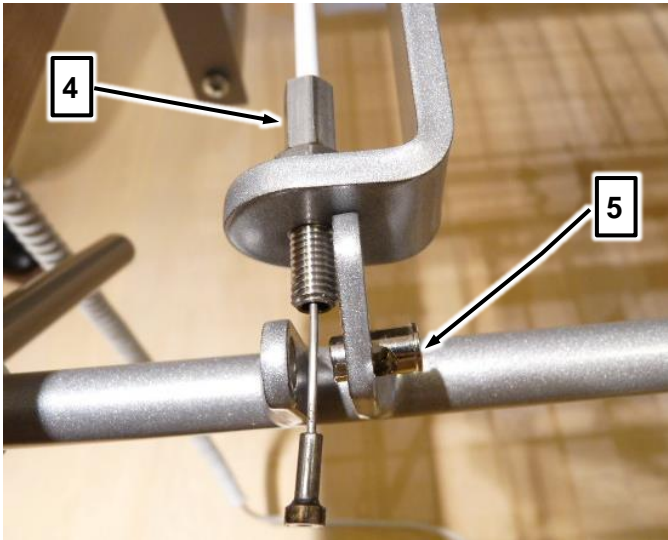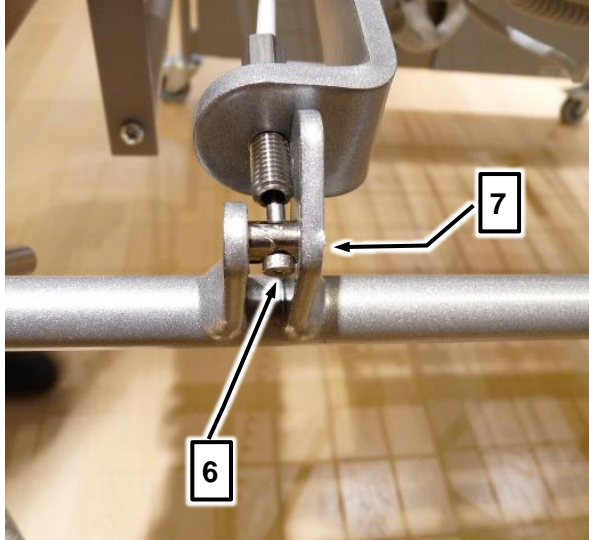
<p>1.</p>	<p>Längenausgleich (Hebelseite) <b>4</b> komplett einschrauben und Schloss <b>5</b> einsetzen.</p> 	<p>1.1</p> <p>Plombe <b>6</b> in die Bohrung des Schlosses ziehen und Schloss bis zum Anschlag hineinschieben <b>7</b>.</p> 
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

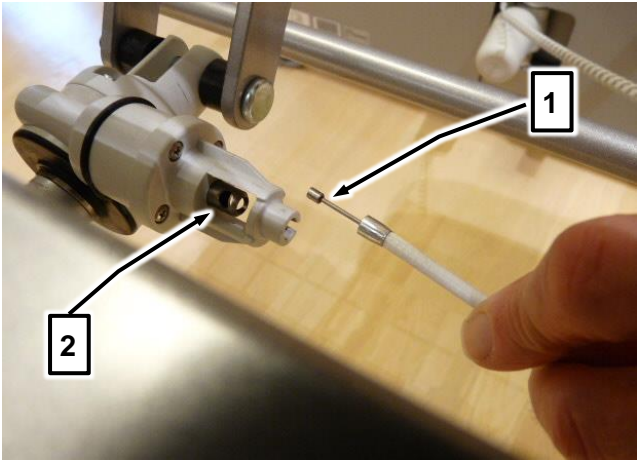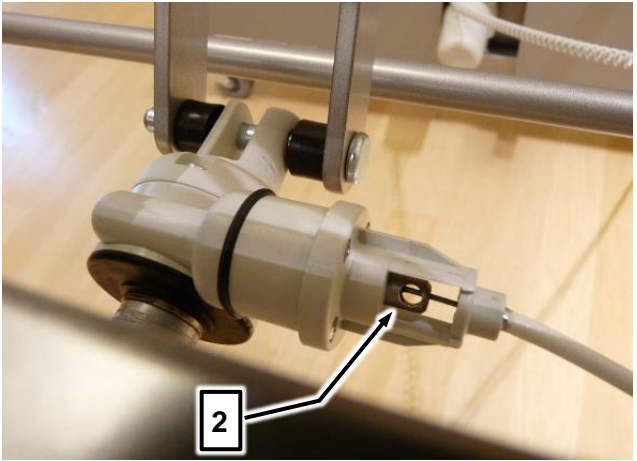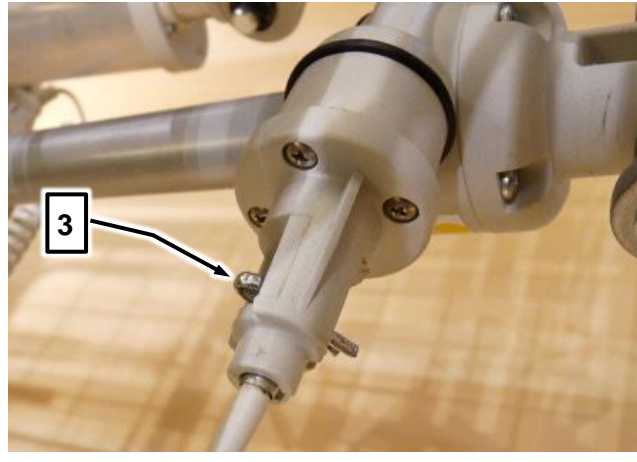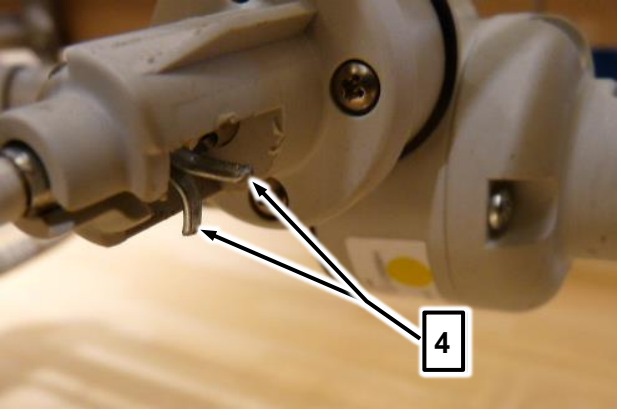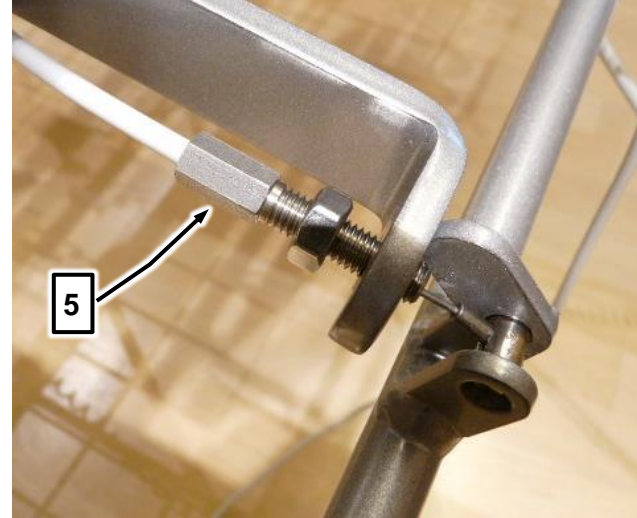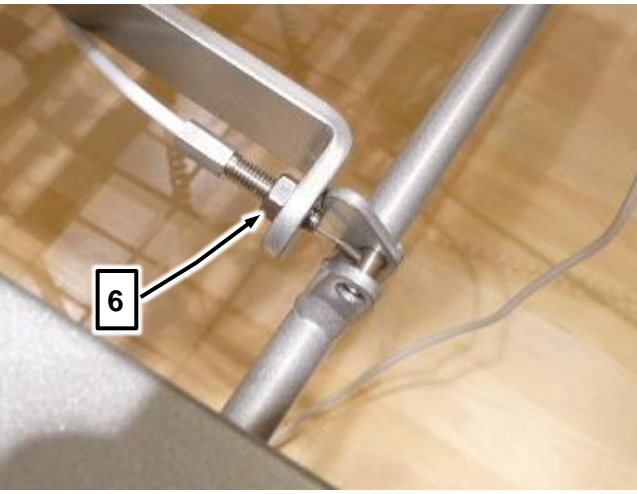

<p>2. Bowdenzug (Motorseite) <b>1</b> in die Bohrung, die sich in der Glocke befindet <b>2</b>, einsetzen.</p> 	<p>2.1 Stellen Sie sicher, dass der Bowdenzug wie abgebildet in der Bohrung <b>2</b> fest sitzt.</p> 
<p>3. Bowdenzug mit dem Splint sichern. Splint hierfür wie abgebildet in Bohrung schieben <b>3</b>.</p> 	<p>3.1 Bowdenzug sichern. Splintenden <b>4</b> hierfür wie abgebildet mithilfe einer Zange aufbiegen.</p> 
<p>4. Längenausgleich (Hebelseite) <b>5</b> solange spannen, bis der Splint (Motorseite) <b>3</b> (Bild oben) anfängt zu wandern.</p> 	<p>5. Position mit der Kontermutter sichern → Kontermutter bis zum Anschlag drehen <b>6</b>.</p>  <p><b>Ende der Montagearbeiten</b></p>

**Burmeier GmbH & Co. KG** (Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe - Telefon: + 49 (0) 5232 / 9841- 0 - Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 41

[www.burmeier.de](http://www.burmeier.de) E-Mail: [info@burmeier.de](mailto:info@burmeier.de)

2018-10-05 | Version 0 | 274708