

Seitensicherungspolster



Montage- und Pflegeanleitung

Zur Montage an Burmeier-Pflegebetten der Baureihe:
Dali, Arminia, Fortuna und Westfalia

Produktbeschreibung

- Textiles Seitensicherungspolster zum Überziehen von Seitensicherungen an Burmeier Pflegebetten.
- Außenhülle aus Schaumleder, innen zusätzlich mit Schaumstoff und Innenfutter ausgekleidet.
- Reißverschluss oder Druckknöpfe zum Verschließen an Seitensicherung.
- Das Obermaterial der Polster besteht aus Kunstleder, „SKAI“ und sind somit auf der Außenseite mit handelsüblichen, verdünnten Desinfektionsmitteln abwischbar.
- Die Innenseite der Polster ist aus gedämpfter Zellwolle/Interlockgewebe gefertigt. Es ist keine materialerhaltende Pflege erforderlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Seitensicherungspolster wird an einem Burmeier Pflegebett mit angestellten Seitensicherungen eingesetzt:

- Wenn es der klinische Zustand des Bewohners erfordert.
- Zum Schutz vor Verletzungen bei besonders unruhigen, verwirrten oder auch sehr abgemagerten, schwächtigen Bewohner.
- Zum Schutz des Bewohners vor Verletzungen, wie z. B. Blutergüssen beim Stößen an die Seitensicherung.
- Zur weiteren Verringerung der Spaltmaße und damit verbundener Einklemm- und Strangulationsgefahr.

Hinweis zu Abbildungen



Beachten Sie bitte: Die in dieser Montageanleitung verwendeten Abbildungen des Seitensicherungspolsters können von dem tatsächlichen Aussehen Ihres Polsters abweichen.

Solche Abweichungen in der Darstellung haben jedoch keinen Einfluss auf die Montage und Funktionalität des Seitensicherungspolsters.

Seitensicherungspolster montieren

i Die Montage ist für die rechte und linke Seitensicherung identisch.

- Seitensicherungspolster auf die Seitensicherung legen (A)
- Beide Teile des Reißverschlusses zusammenstecken (B)
- Reißverschluss schließen (C)
- Seitensicherungspolster entlang der gesamten Seitensicherung straff ziehen und so drehen, dass der Reißverschluss und Druckknöpfe nicht mehr sichtbar sind (D).
- Seitliche Druckknöpfe (links und rechts am Polster) verschließen (E).




A



B



C

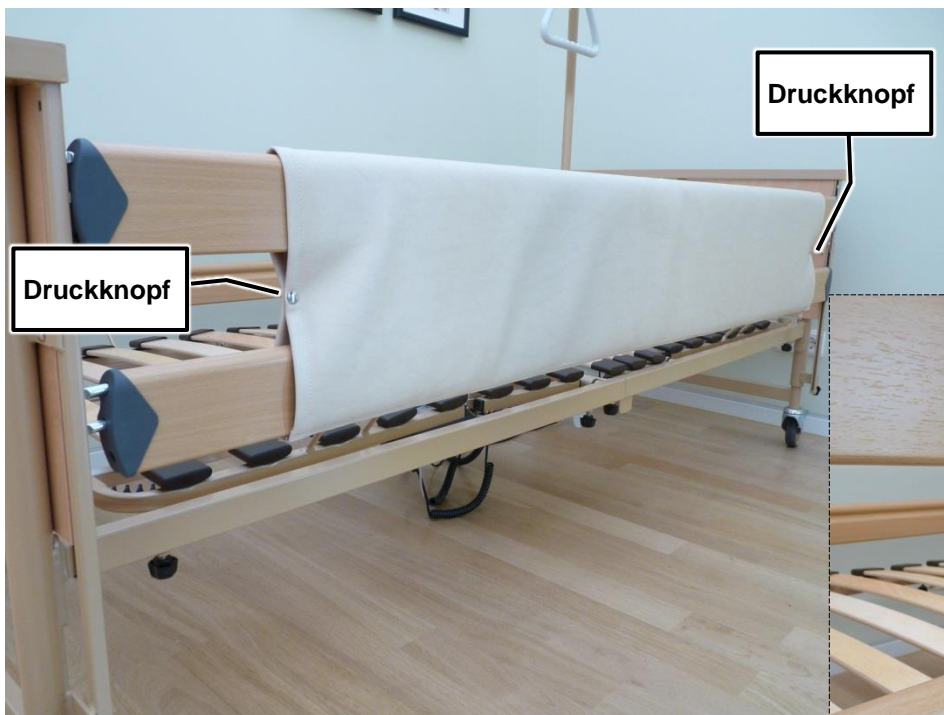

D



E



Wenn auf der Seitensicherung ein Aufsatzholm montiert ist, ist ein Seitensicherungspolster mit größerem Maß anzubringen.

Die Seitensicherung lässt sich nach dem Anbringen des Seitensicherungspolsters normal betätigen.

Reinigung und Desinfektion

Die von Burmeier verwendeten Stoffe sind besonders nässe- und schmutzresistent. Sollte es dennoch zu Verschmutzungen kommen, führen Sie den Reinigungsvorgang bitte gemäß folgender Anleitung durch:

- Reinigen und desinfizieren Sie das Seitensicherungspolster vor der Erstbenutzung, vor jedem Wiedereinsatz und bei Bedarf mit warmen Wasser und milden Reinigungsmitteln. Nach der Wischdesinfektion sollte das Schaumleder immer mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel oder Aerosolsprays.
- Verwenden Sie keine Mittel, die Öl oder Fett beinhalten.
- Reinigen Sie dieses Seitensicherungspolster nicht chemisch oder trocken.
- **Achtung!** Tintenflecken (z. B. Kugelschreiber, Füller ...) sofort entfernen.

Entsorgungshinweis

Das Seitensicherungspolster enthält Kunststoff- und Textilanteile. Dementsprechend ist es als Restmüll fachgerecht zu entsorgen.

Instandhaltung

Das Seitensicherungspolster ist wartungsfrei.

Wenden Sie sich für Ersatzteilbestellungen, Kundendienstanforderungen und bei weiteren Fragen an:

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe
Tel.: 0 52 32 / 98 41- 0 • Fax: 0 52 32 / 98 41- 41
Email: info@burmeier.com

Die notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf der Innenseite des Polsters.





Burmeier GmbH & Co. KG

(Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)

(A Stieglmeyer group company)

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe

Telefon: + 49 (0) 5232 / 9841- 0

Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 41

www.burmeier.de

Email: info@burmeier.com

