

BURMEIER

Gebrauchsanweisung

Nachttisch

Arminius




Modellnummer
61.1612.33

Type
179203



Stand: 24.11.2005

180012

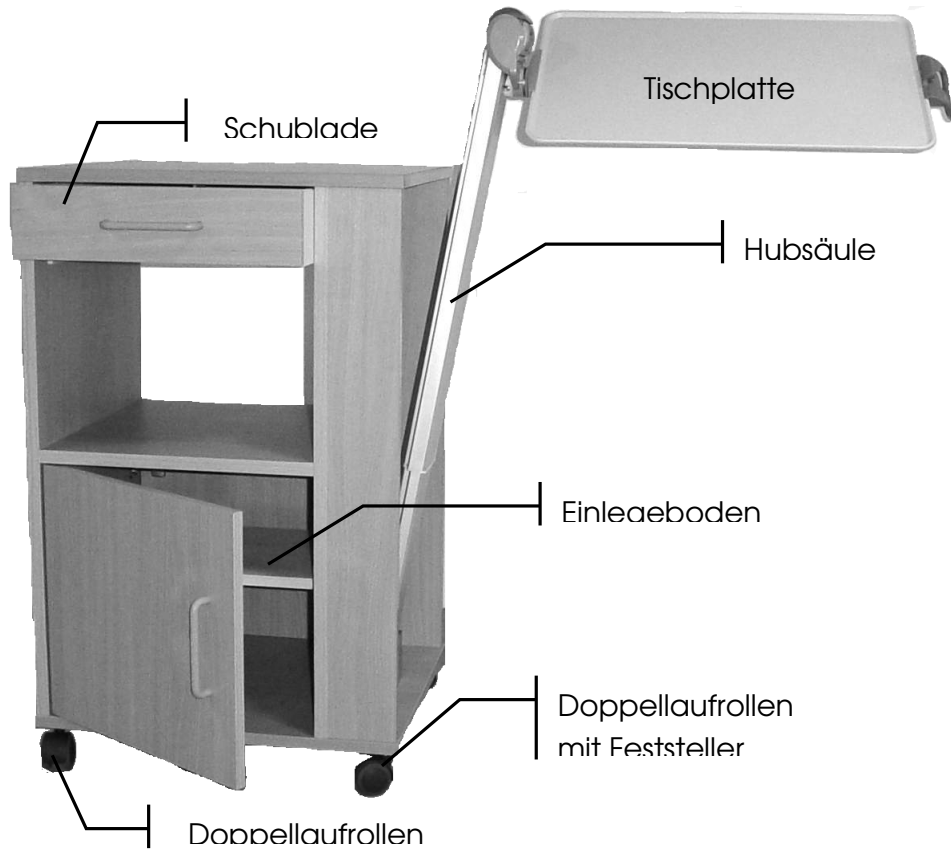

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort.....	3
2 Sicherheitshinweise.....	3
3 Anwendung.....	4
4 Pflegehinweise	5
5 Ersatzteile	5
6 Zubehör.....	6
7 Technische Daten	6
8 Entsorgungshinweise.....	6

1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

die Firma BURMEIER dankt Ihnen für das Vertrauen, das Sie in uns und unseren Produkten mit dem Kauf des Nachttisches „Arminius“ entgegengebracht haben.

Jedes Gerät ist werkseitig auf Sicherheit und Funktionalität geprüft und hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen.

Diese Gebrauchsanweisung informiert Sie als Betreiber und Ihre Anwender bei der täglichen Arbeit über all die Funktionen, die für eine komfortable Bedienung und sichere Handhabung dieses Gerätes notwendig sind.

Daher sollten Sie diese Gebrauchsanweisung auch als praktisches Nachschlagewerk sehen und in der Nähe des Nachttisches jederzeit griffbereit aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Anwendern viel Erfolg bei der Bedienung und sind überzeugt, mit unserem Produkt hierzu einen positiven Beitrag leisten zu können.

Burmeier GmbH & Co. KG

2 Sicherheitshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, um Schäden durch Fehlbedienung zu vermeiden.

Reinigen und desinfizieren Sie den Nachttisch vor der Erstbenutzung und vor jedem Wiedereinsatz.

Weisen Sie die Anwender in die sichere Bedienung des Nachttisches ein

Überzeugen Sie sich vor der Benutzung eines Nachttisches von der Funktionsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Nachttisches und des Zubehörs

Die maximale Belastung der Tischplatte beträgt 8 kg. **Nicht aufstützen!**

Bremsen Sie immer die Laufrollen

3 Anwendung



Hubsäule abschwenken



Griff herunterdrücken



Tischplatte abschwenken



Hinweis

Das Einschwenken der Hubäule sollte mit der flachen Hand erfolgen - Klemmgefahr



Nachttischplatte herausklappen



Höhenverstellung
Hubsäule
Griff entriegeln und
anheben



Tischplatte schwenken

4 Pflegehinweise

Die Tischplatte des Nachttisches besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Bei ABS-Kunststoffen kann es in Verbindung mit leicht ölhaltigen Flüssigkeiten (abhängig von PH-Wert) zu farblichen Veränderungen der Oberfläche kommen.

Folge davon können unschöne Verfärbungen und Randbildungen auf der Oberfläche sein. Eine Festigkeitsminderung des Kunststoffes tritt jedoch nicht ein.

Flüssigkeiten, die diese Verfärbung bewirken können und im praktischen Einsatz am häufigsten vorkommen, sind z.B. Kaffee, Tee oder auch Kodan Forte (eingefärbt).

Beachten Sie aus diesem Grund die Pflegehinweise für ABS-Kunststoffplatten:

Kaffee-, Tee und Kodan Forte Flecken nicht eintrocknen lassen, sondern mit handelsübliche Reinigungsmittel baldmöglichst abwischen.

5 Ersatzteile

Die entsprechenden Ersatzteile sind unter Angabe der Artikel- und Seriennummer bei BURMEIER erhältlich. Die notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild, das sich an der Innenseite im geschlossenen Ablagefach befindet.

JOH. STIEGELMEYER GmbH & Co KG	
D-32018 Herford	
☎ +49 - (0)5221 - 185 - 0	
	
Model	Nati Arminius
Type	179203
No	FA 1367939-0002
Serie	4206 - 00002

158079

Um Funktionssicherheit und Gewährleistungsansprüche zu erhalten, dürfen nur BURMEIER Original-Ersatzteile verwendet werden!

Unsere Gewährleistungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bei Ersatzteillbestellungen, Kundendienstanfragen und weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

BURMEIER GmbH & Co. KG

(Ein Unternehmen der STIEGELMEYER-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270 · D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 0 52 32/98 41 – 0 · Fax: 0 52 32/98 41 – 41

Email: auftrags-zentrum@burmeier.de

6 Zubehör

Für den Nachttisch Arminius ist folgendes Zubehör erhältlich:

- Kunststoff-Schubladeneinsatz
- Flaschenkorb für 3 Flaschen

7 Technische Daten

Maße: Breite 49 cm, Länge: 54 cm, Höhe 88 cm

Gesamtlänge: 124 cm (Tischplatte ausgeklappt)

Höhe Tischplatte: 77 cm bis 110 cm

Tischplatte: 55 x 38 cm

Max Stützlast Tischplatte: 8 kg (Mitte Tischplatte)

Rollensatz: Doppellaufrollen (gebremst) Ø 50 mm

8 Entsorgungshinweise

Alle Verpackungsmaterialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen (Grüner Punkt).

- Im Falle einer Verschrottung des Gerätes sind die Kunststoff- Holz- und Metallteile getrennt und fachgerecht zu entsorgen.

Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

Herausgegeben von:

Burmeier GmbH & Co. KG
(Ein Unternehmen der STIEGELMEYER-Gruppe)
Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe
Tel. : 0 52 32/98 41- 0 • Fax: 0 52 32/98 41- 41
www.burmeier.de
Email: auftrags-zentrum@burmeier.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers!

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten!
Arminius_v0_180012.doc Stand: 2411.2005